

1. Belangrijke veiligheidsinformatie

 **Lees vóór gebruik van dit product eerst alle instructies.**
Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

De waarschuwingen geven belangrijke veiligheidsinstructies aan. Wanneer deze instructies niet in acht worden genomen, kan dat persoonlijk letsel of schade aan het product veroorzaken. Met de volgende symbolen en signaalwoorden wordt de betekenis van de waarschuwingen weergegeven:

WAARSCHUWING

Kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

VOORZICHTIG

Kan leiden tot lichte verwondingen.

LET OP

Kan tot materiële schade leiden
(niet gerelateerd aan persoonlijk letsel).

i Informatie

Nuttige of belangrijke informatie
die niet aan veiligheid is gerelateerd.

WAARSCHUWING

Om gezondheidsrisico's te voorkomen en het risico op ernstig letsel te beperken:

- Kolven kan de bevalling opwekken. Begin pas met kolven na de bevalling. Als u zwanger wordt in de periode dat u borstvoeding geeft of afcolft, raadpleeg dan een professionele zorgverlener voordat u ermee doorgaat.
- Als u besmet bent met hepatitis B, hepatitis C of het hiv-virus (humaan immunodeficiëntievirus), wordt het risico dat het virus via moedermelk op de baby wordt overgedragen, niet beperkt of geëlimineerd door af te kolven.
- Maak alle onderdelen die in aanraking komen met de borst en moedermelk na elk gebruik schoon.
- Kleine onderdelen kunnen door peuters worden ingeslikt. Er is nauwlettend toezicht vereist als de borstkolf of accessoires in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

VOORZICHTIG

Om gezondheidsrisico's te voorkomen en het risico op letsel te beperken:

- Dit product is bestemd voor gebruik door één persoon. Gebruik door meerdere personen kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen.
- Het apparaat en de accessoires zijn niet hittebestendig. Houd ze uit de buurt van verwarmde oppervlakken en open vuur.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Inspecteer de afzonderlijke onderdelen vóór elk gebruik op beschadiging of slijtage. Gebruik nooit een defect apparaat. Gooi onderdelen bij de eerste tekenen van beschadiging of verzwakking weg.
- Repareer het apparaat niet zelf. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Verwarm moedermelk niet in de magnetron of door de melk te koken. De 'hot spots' die tijdens het gebruik van een magnetron in de melk ontstaan, kunnen ernstige brandwonden aan de mond van de baby veroorzaken. (Een magnetron kan ook de samenstelling van de moedermelk veranderen.)
- Reinig en desinfecteer alle onderdelen die in aanraking komen met de borst en moedermelk vóór het eerste gebruik.
- Gebruik bij het apparaat alleen door Medela aanbevolen onderdelen.
- Het eerste gebruik van een borstkolf kan enigszins oncomfortabel zijn, maar het mag geen pijn veroorzaken. Als u twijfelt over de juiste maat borstschild, gaat u naar www.medela.com of raadpleegt u een lactatiekundige of borstvoedingsspecialist. Deze kan u helpen de juiste maat te kiezen.

LET OP

- Ga voorzichtig om met flessen en onderdelen:
- Ingevroren plastic flessen en onderdelen worden broos en daardoor is er een verhoogde kans op breken wanneer deze vallen.
- Flessen en onderdelen kunnen beschadigd raken bij verkeerde hantering (bijvoorbeeld als ze vallen, te vast worden dichtgedraaid of worden omgestoten).
- Gebruik de moedermelk niet als de fles of een onderdeel tekenen van beschadiging vertoont.

Inhoud

1. Belangrijke veiligheidsinformatie	45
2. Beoogd doel	48
3. Productomschrijving	48
3.1 Productvarianten	48
3.2 De Harmony borstkolf omvat	48
4. Aan de slag	48
5. Reinigen	49
5.1 De borstkolf afwassen en desinfecteren	49
6. Voorbereidingen voor het afkolven	51
6.1 De juiste maat borstschild kiezen	51
6.2 De connector en het borstschild in elkaar zetten	51
6.3 De handgreep in elkaar zetten	52
6.4 Het borstschild plaatsen	52
7. De borstkolf bedienen	52
7.1 Het ritme van de baby imiteren (2-Phase Expression)	52
7.2 Moedermelk afkolven	53
7.3 Na het afkolven	53
8. Moedermelk hanteren	54
8.1 Algemene richtlijnen voor het bewaren	54
8.2 Invriezen	54
8.3 Ontdooien	55
9. Problemen oplossen	55
10. Accessoires	56
11. Garantie	56
12. Afvalverwijdering	56
13. Betekenis van de symbolen	56
14. Internationale voorschriften	57
14.1 Drinkgerei voor kinderen	57
15. Technische specificaties	57

2. Beoogd doel

De Harmony borstkolf is een handkolf die lacterende moeders kunnen gebruiken voor het afkolven en opvangen van moedermelk. De Harmony borstkolf is bedoeld voor gebruik door één persoon.

3. Productomschrijving

De Harmony is een handkolf voor persoonlijk gebruik, met een PersonalFit Flex borstschild en een ergonomische 2-Phase handgreep.

Hierdoor kunt u afwisselen tussen korte oppervlakkige bewegingen om de melkstroom te stimuleren, en lange, diepe bewegingen om uw melk optimaal te verwijderen – zoals uw baby het doet.

De Harmony borstkolf

- is gemakkelijk te gebruiken en te reinigen.
- maakt het mogelijk uw melk stil en discreet af te kolven.
- is voorzien van een 24 mm PersonalFit Flex borstschild voor meer comfort en een betere melkproductie.

48

3.1 Productvarianten

De Harmony borstkolf is er in twee varianten:

- Harmony borstkolf: omvat alleen de borstkolf.
- Harmony Essentials Pack: bevat de borstkolf, een siliconen speen die past op de Harmony fles, vier moedermelkbewaarzakjes en vier ultradunne Safe & Dry zoogkompressen.

Lees ook de gebruiksaanwijzing die bij deze aanvullende producten wordt meegeleverd.

3.2 De Harmony borstkolf omvat

Zie figuur 6 op de uitvouwbare pagina's.

- 6-01 (Disposable) beschermkap
- 6-02 PersonalFit Flex borstschild 24 mm
- 6-03 Connector
- 6-04 Handgreep
- 6-05 Pen met O-ring
- 6-06 Diafragma
- 6-07 Vacuümklep
- 6-08 Membraan van de vacuümklep (2 stuks)

- 6-09 Fles
- 6-10 Deksel
- 6-11 Flesstandaard

De volgende artikelen worden alleen bij het Harmony Essentials Pack meegeleverd:

- 6-12 Voedingspeen
- 6-13 Moedermelkbewaarzakje (4 st.)
- 6-14 Safe & Dry zoogkompressen (4 st.)

4. Aan de slag

Voordat u voor het eerst gaat afkolven, treft u voorbereidingen door de onderdelen van de borstkolf uit elkaar te halen, ze af te wassen en te desinfecteren – zie **hoofdstuk 5.1**.

5. Reinigen

5.1 De borstkolf afwassen en desinfecteren

Afwassen is niet hetzelfde als desinfecteren. Deze handelingen moeten afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd om u en uw baby te beschermen en de prestaties van het apparaat op peil te houden.

Afwassen: het reinigen van de oppervlakken van de onderdelen door het fysiek verwijderen van vervuiling.

Desinfecteren: het doden van micro-organismen zoals schimmels, bacteriën of virussen die zich mogelijk op de oppervlakken van de onderdelen bevinden.

VOORZICHTIG

- Haal alle onderdelen die in aanraking komen met moedermelk direct na het gebruik uit elkaar en was deze af. Zo kunt u melkresten verwijderen en de groei van bacteriën tegengaan.
- Was uw handen grondig met zeep en water.
- Gebruik voor het reinigen alleen leidingwater van drinkkwaliteit of flessenwater.
- Leg onderdelen van de kolf niet rechtstreeks in de gootsteen om deze af te spoelen of af te wassen. Doe dit in een schone waskom die u uitsluitend gebruikt voor onderdelen voor het voeden van uw baby.
- Gebruik geen theedoek om onderdelen droog te wrijven of deppen.
- Gebruik geen ontsmettingsmiddelen bij het reinigen.

LET OP

Let op het volgende:

- Zorg ervoor dat u tijdens het reinigen geen onderdelen van de kolf beschadigt. Gebruik bij het reinigen geen scherp voorwerp (zoals een tandenstoker).
- Sommige delen van de Harmony borstkolf zijn erg klein (bv. de O-ring of het membraan van de vacuümklep). Zorg ervoor dat er geen onderdelen ontbreken als u de kolf na het reinigen in elkaar zet.
- Bewaar de delen van de kolf na het drogen tot het volgende gebruik in een schone zak/verpakking.
- Bewaar geen natte of vochtige onderdelen omdat zo schimmel kan ontstaan.
- Als u na het koken witte resten op de onderdelen ziet, heeft uw water mogelijk een hoog mineraalgehalte. Verwijder deze resten door de onderdelen met een schone doek af te vegen en laat de onderdelen aan de lucht drogen.
- Om aanslag van mineralen die zich na verloop van tijd afzetten, te voorkomen, wordt het aanbevolen om voor het koken van onderdelen gedestilleerd water te gebruiken.

i Informatie

Als u een afwasmachine gebruikt, kunnen onderdelen verkleuren. Dit heeft geen invloed op de werking van het onderdeel.

Wat te doen als: Zie uitvoerige instructies op de volgende pagina.

Verwijder vóór het eerste gebruik de beschermkap (6-01) van het borstschild en gooi deze weg. Was de onderdelen van de kolf en flessen af en desinfecteer ze volgens onderstaande stappen 1 t/m 4. Was de onderdelen van uw kolf en flessen **na elk gebruik** en desinfecteer ze **eens per dag** nadat ze zijn afgewassen.


1. Uit elkaar halen

Zie figuur 1 op de uitvouwbare pagina.

- i. Haal de kolf uit elkaar tot losse onderdelen (borstschild, connector, handgreep, vacuümklep en melkflesje).
- ii. Verwijder het diafragma van de handgreep en trek de pen eruit.
- iii. Verwijder het membraan van de vacuümklep.
- iv. Haal het melkflesje, deksel en de flesstandaard uit elkaar.

2. Afwassen


Met de hand afspoelen en afwassen

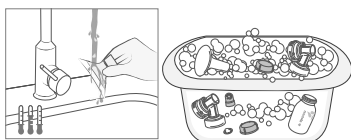

- i. Spoel de losse onderdelen met koel water (circa 20 °C).
- ii. Reinig deze onderdelen in ruim warm zeepwater (circa 30 °C). Gebruik een gangbaar afwasmiddel.
- iii. Spoel de onderdelen gedurende 10 tot 15 seconden met koel water (circa 20 °C).

of


Afwassen in de afwasmachine

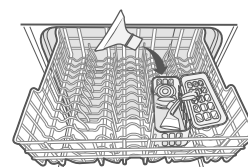

Leg de losse onderdelen op het bovenste rek of in de bestekmand. Gebruik een gangbaar afwasmiddel.

3. Desinfecteren (vóór het eerste gebruik en eenmaal per dag)

Desinfecteren in een pan met water

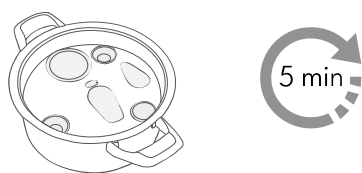

Zorg ervoor dat de losse, afgewassen onderdelen onder water staan en laat ten minste 5 minuten koken.

of

Desinfecteren in de magnetron



(met uitzondering van de handgreep)

Gebruik Quick Clean* magnetronzakken volgens de voorschriften op de zakken.

*Raadpleeg de plaatselijke website/winkels voor informatie over de beschikbaarheid in uw land.

4. Drogen

Laat de onderdelen op een schone, ongebruikte theedoek of keukenpapier aan de lucht drogen. Bewaar de droge onderdelen in een schone omgeving. Bewaar de onderdelen niet in een luchtdichte verpakking/zak als ze nog vochtig zijn. Het is belangrijk dat al het achtergebleven vocht opdroogt.

6. Voorbereidingen voor het afkolven

Zet de borstkolf alleen in elkaar met schone en droge onderdelen. Raadpleeg **hoofdstuk 5** voor het reinigen.

VOORZICHTIG

Om besmetting van de melk te voorkomen:

- Was uw handen grondig met water en zeep voordat u de delen van de kolf en de borsten aanraakt.
- Droog uw handen af met een schone, ongebruikte handdoek of een papieren handdoek voor eenmalig gebruik.
- Raak de binnenkant van flesjes en deksels niet aan.

Om ervoor te zorgen dat het apparaat naar behoren en veilig werkt:

- Controleer vóór gebruik de onderdelen van de kolf op slijtage en beschadiging. Vervang deze indien nodig.
- Controleer vóór gebruik altijd of alle onderdelen schoon zijn. Als ze vuil zijn, reinigt u ze zoals beschreven in **hoofdstuk 5**.

LET OP



O-ring

Pen



De O-ring zorgt voor een afgedichte verbinding tussen de handgreep en de connector. Dit is nodig om een vacuüm te vormen.

Zorg dat de witte O-ring zich in de groef van de pen bevindt.

Als de ring ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met de klantenservice van Medela.

6.1 De juiste maat borstschild kiezen





Zie figuur  7 op de uitvouwbare pagina's.

1. Meet de diameter van uw tepel om de juiste maat te bepalen ( 7-01).
2. Kies het borstschild dat iets groter is dan uw tepel ( 7-02).

Ga voor meer informatie over het bepalen van de maat borstschild naar www.medela.com.

6.2 De connector en het borstschild in elkaar zetten

Zie figuur  2 op de uitvouwbare pagina's.

1.  2-01 Druk het borstschild voorzichtig in de opening aan de bovenkant van de connector.
→ Kies een borstschild in een maat die bij uw behoeften past.
2.  2-02 Plaats het membraan van de vacuümklep horizontaal op de vacuümklep. Druk de knop aan de achterkant van het membraan voorzichtig in de kleinste opening van de vacuümklep tot deze vastklikt.
→ Het membraan moet vlak op de vacuümklep liggen.
3.  2-03 Druk de vacuümklep op de binnenring van de connector.
→ De vacuümklep moet zijdelings gepositioneerd zijn, zoals getoond op de afbeelding.
4.  2-04 Schroef de fles op de connector.

6.3 De handgreep in elkaar zetten

Zie figuur 3 op de uitvouwbare pagina's.

1. 3-01 Plaats de pen (met de O-ring) in de opening aan de bovenkant van het diafragma.
2. 3-02 Zorg dat de ovaalvormige basis van de pen zich in de juiste positie in het diafragma bevindt.
3. 3-03 Plaats het diafragma in de handgreep van de kolf. Let op de richting (de uitsparing in het diafragma past om het lipje van de handgreep) en druk krachtig op de hele hoek zodat de juiste verzegeling ontstaat.
4. 3-04 Plaats de pen van de handgreepset in de opening aan de bovenkant van de connector. Druk aan tot de pen vastklikt.

6.4 Het borstschild plaatsen

Zie figuur 4 op de uitvouwbare pagina's.

1. De ovale borstschilden kunnen worden gedraaid (360°), en in de gewenste positie worden geplaatst die voor u het meest comfortabel voelt.
2. 4-01 Plaats het borstschild op de borst met de tepel in het midden van de schacht.
3. 4-02 Houd het borstschild met uw duim en wijsvinger op de borst. Ondersteun de borst met de palm van uw hand.
4. Begin met afkolven, zoals beschreven in **paragraaf 7.2**.

7. De borstkolf bedienen

7.1 Het ritme van de baby imiteren (2-Phase Expression)


Baby's hanteren een zuigritme op twee snelheden. Eerst zuigen ze snel, en als de melk eenmaal gaat stromen, gaan ze over op een langzamer, dieper zuigritme. Het snelle zuigritme stimuleert de toeschietreflex en brengt de melkstroom op gang; het langzame zuigen verwijdert de melk voor de voedingsfase.



2-Phase Expression is een kolfritletme met twee snelheden dat het natuurlijke zuigritme van de baby imiteert. Door de ontwerp van de handgreep van de kolf kunt u starten met het snelle zuigritme, de **stimulatiefase**. Hiertoe bedient u de korte kant van de handgreep met uw duim in een snel ritme. Als u de melk ziet stromen of de toeschietreflex voelt, schakelt u over op de **afkolfase** door de lange kant van de handgreep met uw vingers langzamer en met lange bewegingen te bedienen.

7.2 Moedermelk afkolven

VOORZICHTIG

- Houd de kolf niet vast aan de fles.
Dit kan leiden tot stuwings en verstopping van de melkkanalen.
- Vul de fles niet verder dan tot aan de 150ml-markering.
- Raadpleeg uw professionele zorgverlener of borstvoedingsspecialist als u slechts een minimale hoeveelheid of geen melk kunt afkolven of als het afkolven pijnlijk is.

Zie figuur  5 op de uitvouwbare pagina's.

1.  5-01 Start het afkolven met stimuleren: Druk het kleinste deel van de handgreep met uw duim naar beneden. Dit is het deel waarop melkdruppels zijn afgebeeld. Druk en laat snel weer los, herhalen tot de melkstroom op gang komt.
2.  5-02 Als de melk gaat stromen, schakel dan over op de afkolfmodus: Druk het onderste, lange deel van de handgreep met uw vingers omlaag.
Hierdoor wordt een vacuüm gecreëerd waardoor het stromen van de melk wordt bevorderd. Door de snelheid waarmee de handgreep wordt ingeknepen en de druk die wordt gecreëerd, regelt u het vacuümniveau.
Beslis zelf welk kolfritme voor u optimaal is.
3. Stop het afkolven als u merkt dat de melk niet meer stroomt of als de fles vol is.

7.3 Na het afkolven

Bereid de melk als volgt voor om deze te bewaren:

1. Draai de fles los van de connector.
2. Gebruik de flesstandaard om te voorkomen dat de fles omvalt.
3. Sluit de fles af met een deksel.

8. Moedermelk hanteren

8.1 Algemene richtlijnen voor het bewaren

Richtlijnen voor het bewaren van pas afgekolfd moedermelk (voor gezonde, voldragen baby's)

Kamertemperatuur 16 tot 25 °C (60 tot 77 °F)	Koelkast 4°C (39°F) of kouder	Vriezer -18°C (0°F) of kouder	Moedermelk ontdooit in de koelkast
Maximaal 4 uur is het beste	Maximaal 3 dagen is het beste	Maximaal 6 maanden is het beste	Bij kamertemperatuur: maximaal 2 uur
*Maximaal 6 uur voor moedermelk die onder zeer schone omstandigheden is afgekolfd	*Maximaal 5 dagen voor moedermelk die onder zeer schone omstandigheden is afgekolfd	*Maximaal 9 maanden voor moedermelk die onder zeer schone omstandigheden is afgekolfd	Koelkast: maximaal 24 uur Niet opnieuw invriezen!

*Richtlijnen voor het afkolven van moedermelk onder zeer schone omstandigheden: Voordat de moedermelk wordt afgekolfd, moeten moeders hun handen wassen met zeep en water of met een op alcohol gebaseerde handreiniger. Kolfonderdelen, flessen en de plek waar wordt afgekolfd moeten schoon zijn. Borsten en tepels hoeven voor het afkolven niet te worden gewassen.

- Deze richtlijnen voor bewaren en ontdooien van moedermelk zijn aanbevelingen. Neem contact op met uw lactatiekundige of borstvoedingspecialist voor meer informatie.
- Bewaar moedermelk op de koelste plaats in de koelkast (achterin op de glazen plaat boven de groentelade).

8.2 Invriezen

LET OP

- Door herhaaldelijk invriezen/ontdooien wordt de structuur van de melk vernietigd. Vries moedermelk daarom nooit opnieuw in.
- Vries afgekolfd moedermelk in plastic flessen of moedermelkbewaarzakjes in. Vul de flesjes of zakken voor niet meer dan 3/4, zodat de melk kan uitzetten.
- Label de flesjes of moedermelkbewaarzakjes met de afkolfdatum en de hoeveelheid afgekolfd melk.
- Ingevroren plastic flessen en onderdelen worden broos en daardoor is er een verhoogde kans op breken wanneer deze vallen.
- Gebruik de moedermelk niet als de fles of een onderdeel tekenen van beschadiging vertoont.

8.3 Ontdooien

VOORZICHTIG

Ontdooi of verwarm moedermelk niet in een magnetron of in een pan met kokend water. Zo blijven de belangrijke bestanddelen behouden en voorkomt u brandwonden.

- Ontdooi de melk door deze gedurende de nacht in de koelkast te plaatsen. Zo blijven de bestanddelen van de moedermelk behouden.
- Een andere mogelijkheid is om het flesje of het moedermelkbewaarzakje in warm water (max. 37 °C/98,6 °F) te plaatsen.

LET OP

Draai het flesje of zakje voorzichtig rond om eventueel gescheiden vet te mengen. Vermijd hard schudden en roeren van de melk.

9. Problemen oplossen

Raadpleeg de kolom "Probleem" in de probleemoplossingstabel bij een afwijkende werking van de borstkolf en volg de instructies in de kolom "Oplossing".

Probleemoplossingstabel

Probleem	Oplossing
Er is weinig of geen zuigkracht	Controleer of de O-ring op de pen aanwezig is en in goede staat verkeert. Als de ring ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met de klantenservice van Medela. Zorg ervoor dat het borstschild de borst rondom luchtdicht afsluit. Controleer of de gele vacuümklep en het witte membraan schoon en onbeschadigd zijn. Controleer of het membraan vlak op de vacuümklep ligt. Controleer of de vacuümklep zijdelings op de connector is gepositioneerd. Controleer of de onderdelen van de handgreep correct in elkaar zijn gezet. Controleer alle aansluitingen. Als de zuigkracht na deze stappen niet is verbeterd, neem dan contact op met de klantenservice van Medela.
Er komt geen melkstroom op gang	Controleer of de borstkolf correct in elkaar is gezet en er zuigkracht is. Ontspan en neem 10-15 minuten pauze als het afkolven na twee opeenvolgende stimulatiesessies niet op gang komt. Raadpleeg uw lactatiekundige/borstvoedingsspecialist als de melkstroom ook dan niet op gang komt.

Neem contact op met de klantenservice van Medela als u het probleem met de borstkolf niet hebt kunnen oplossen of als u nog vragen hebt. Ga voor contactgegevens naar www.medela.com. Kies uw land onder "Contact".

10. Accessoires

De volgende producten worden afzonderlijk verkocht:

- PersonalFit Flex borstschild, maten S (21 mm), M (24 mm), L (27 mm), XL (30 mm)
- Moedermelkflesje 150 ml, 250 ml
- Moedermelkbewaarzakjes

Raadpleeg de plaatselijke website/winkels voor informatie over de beschikbaarheid in uw regio.

11. Garantie

Raadpleeg op www.medela.com de "Internationale Garantie" voor Medela producten om na te lezen of en in welke mate de garantie voor dit product geldt.

12. Afvalverwijdering

Als de borstkolf het einde van de levensduur heeft bereikt, haalt u de onderdelen van de borstkolf uit elkaar en voert u deze af in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Borstschilden, connector en accessoires

De onderdelen zijn gemaakt van kunststoffen die niet schadelijk zijn voor het milieu als u deze weggooit bij het huisvuil. Recycle of voer af volgens de lokale voorschriften.

13. Betekenis van de symbolen

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt



Algemeen veiligheidswaarschuwingssymbool, verwijst naar informatie betreffende de veiligheid.



Lees en volg de gebruiksaanwijzingen.

Symbolen die op de productonderdelen en de verpakking zijn vermeld.

	Geeft de fabrikant aan.		Geeft de datum van productie aan.
	Geeft het onderdeelnummer van het apparaat aan.		Geeft het lot-/batchnummer aan.
	Lees en volg de gebruiksaanwijzingen.		De verpakking bevat producten die zijn goedgekeurd om in contact te komen met levensmiddelen conform EG-verordening 1935/2004.
	Uit de buurt van regen houden. In een droge omgeving bewaren.		Geeft aan dat het materiaal deel uitmaakt van een terugwinnings-/recyclingproces.
	Plaats het product niet in zonlicht.		Geeft aan dat de verpakking uit karton bestaat.
	Bevat breekbare goederen. Voorzichtig.		

14. Internationale voorschriften

14.1 Drinkgerei voor kinderen

De speen en fles die bestemd zijn voor het voeden van baby's, voldoen aan de Europese standaard EN 14350.

15. Technische specificaties

Materialen die in contact komen met de huid of de melk

- Borstschild: polypropyleen, thermoplastisch elastomeer
- Connector, vacuümklep: polypropyleen
- Diafragma, membraan van de vacuümklep: Silicone rubber
- Fles: polypropyleen
- Deksel: polypropyleen

Alle onderdelen die met moedermelk in aanraking komen bevatten geen BPA (Bisfenol A).

