



INFORMATIEPAGINA

INHOUD

Na ontvangst van uw LifeVac-eenheid controleert u of u hebt ontvangen wat u hebt besteld. De standaard inhoud voor elke type LifeVac-configuratie is als volgt. U kunt aanvullende maskers in de gewenste maat kopen. Er is een oefenmasker meegeleverd met instructies voor het gebruik ervan, zodat u vóór het gebruik in een noodgeval eerst bekend kunt raken met de LifeVac.

Na ontvangst van de LifeVac-eenheid inspecteert u de inhoud visueel op defecten of barsten.

LV01 - LifeVac Standaardkit - inhoud: 1 x LifeVac-apparaat, 3 x Maskers, maten kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van het gekleurde label, 1 x Gebruiksaanwijzing, 1 x Folder met BLS-protocol, 1 x Feedbackkaart.

LV07 - LifeVac EMS-kit - inhoud: 1 x LifeVac-apparaat, 1 x Extra-large volwassen masker geïdentificeerd met een rood label, 1 x Large volwassen masker geïdentificeerd met een oranje label, 2 x Medium volwassen maskers geïdentificeerd met een groen label, 1 x Small volwassen masker geïdentificeerd met een geel label, 1 x Kindermasker geïdentificeerd met een wit label, 1 x Gebruiksaanwijzing, 1 x Folder met BLS-protocol, 1 x Feedbackkaart.

LV08 - LifeVac Wandgemonteerde kit - inhoud: 1 x LifeVac-apparaat, 1 x Large volwassen masker of 1 x kindermasker, 2 x Medium volwassen maskers, 1 x Small volwassen masker, 1 x Gebruiksaanwijzing, 1 x Folder met BLS-protocol, 1 x Feedbackkaart, 1 x A3-protocolposter, 1 x Wandbevestigingen.

Er zijn aanvullende accessoires verkrijgbaar voor uw LifeVac-eenheid.

Dit zijn de volgende:

X-Large, Large, Medium, Small maskers en kindermaskers, een lege wandmonteerbare plastic doos, EMS-tas van doorzichtig plastic, LifeVac-reistas. Bezoek onze website www.lifevac.uk voor meer informatie.

LIFEVAC MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT OP KINDEREN MINDER DAN 10 KG BIJ GEBRUIK VAN HET KINDERMASKER, GEÏDENTIFICEERD DOOR EEN WIT LABEL

Richtings-/testprocedure



Gebruiksaanwijzingen

VOLG EERST HET VOLLEDIGE BLS-VERSTIKKINGSPROTOCOL EN BEL DE HULPDINSTEN



ALS ER GEEN SPONTANE ADEMHALING WORDT OPGEMERKT, VOLGT U HET STANDAARD BLS-REANIMATIEPROTOCOL

GEBRUIKSINDICATIES

De LifeVac-eenheid is een levensreddend instrument voor eenmalig gebruik, ontwikkeld voor het reanimeren van een verstikkend slachtoffer wanneer de standaard BLS (Basic Life Support) zonder succes is opgevolgd of niet kan worden toegepast. LifeVac is eenvoudig te gebruiken, beschikbaar voor het algemene publiek en is mogelijk het laatste middel voor het redden van het leven van een verstikkend slachtoffer wanneer alle andere middelen hebben gefaald.

ALGEMENE ZORG

Bewaar de LifeVac-eenheid op kamertemperatuur. Niet in direct zonlicht opbergen. Niet opbergen in garages of zolders, aangezien extreme warmte of kou de integriteit van de eenheid kunnen beïnvloeden. Een ideale plek om de eenheid op te bergen, is een keukenkastje of een toegankelijke plek in een noodgeval. Als u bekend bent geraakt met het gebruik van de LifeVac, gooit u het oefenmasker weg, pakt u uw eenheid, de maskers en de documentatie weer in de opslagtas, zoals u alles hebt ontvangen. Zorg dat er geen maskers aan de eenheid worden bevestigd. Inspecteer de maskers regelmatig en wij adviseren u met klem te overwegen de eenheid om de twee jaar te vervangen. U kunt vervangingsmaskers bestellen via www.lifevac.uk. LifeVac is niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex.

RETOURNERINGSBELEID

Controleer de eenheid op barsten of defecten. Als er defecten worden gevonden, neemt u onmiddellijk contact op met www.lifevac.uk of info@lifevac.uk om de eenheid om te ruilen of tegen creditering te retourneren. Alle defecten moeten binnen 5 dagen na de factureringsdatum worden gemeld.

CONTRA-INDICATIES VOOR GEBRUIK

LifeVac moet worden gebruikt wanneer het standaard BLS-protocol zonder succes is opgevolgd of niet kan worden toegepast. LifeVac mag UITSLUITEND worden gebruikt voor de reanimatie van een verstikkend slachtoffer. LifeVac mag niet worden gebruikt als het slachtoffer niet stikt en uit zichzelf kan ademen. LifeVac is uitsluitend voor gebruik bij mensen. De eenheid mag uitsluitend op het gezicht worden gebruikt. LifeVac bevat geen latex. LifeVac mag niet worden gebruikt bij mensen lichter dan 10 kilo zonder hierbij een kindermasker te gebruiken. Patiënten met een endotracheale slang mogen LifeVac niet gebruiken. Maskers worden meegeleverd en de richtlijnen van de fabrikant zijn van toepassing. Fabrikanten bevelen een levensduur van 24 maanden voor de maskers aan.

RISICO'S

Er wordt niet gegarandeerd dat de LifeVac-eenheid een verstikkend slachtoffer kan reanimeren. Er wordt een masker meegeleverd met instructies voor de richting, zodat u uzelf bekend kunt maken met de eenheid voordat zich een noodgeval voordoet. Gebruiken op eigen risico. LifeVac is niet verantwoordelijk voor letsel en/of overlijden als gevolg van het gebruik. Risico's kunnen onder meer bestaan uit kneuzingen op het gezicht door het aanbrengen van het masker en hoesten na de verwijdering van het object. Om deze risico's te beperken, moet LifeVac worden gebruikt in overeenstemming met de meegeleverde instructies. Bezoek onze website www.lifevac.uk voor meer informatie en instructievideo's.



Let op: alle documenten vóór het



Product is latexvrij



Hergebruik is niet toegestaan



Uit direct zonlicht houden



Met zorg hanteren



GEBRUIKSAANWIJZINGEN IN HET GEVAL VAN VERSTIKKING

Als een slachtoffer stikt


- 1 Moedig het slachtoffer aan om te hoesten.
- 2 Als de hoest niet doelmatig is, geeft u hem of haar 5 klappen op de rug.
- 3 Als de obstructie niet is verwijderd, volgt u dit op door 5 harde buikstoten.



Herhaal deze serie totdat de blokkering is verwijderd of het slachtoffer bewusteloos raakt

Als het slachtoffer bewusteloos is of als stap 2 en 3 niet kunnen worden toegepast, belt u de hulpdiensten en gebruikt u LifeVac.

4

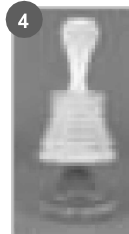

Plaats een masker in de juiste maat over de mond en neus, zodat er een goede afsluiting wordt gecreëerd

Druk het handvat/de balgen in

Trek het handvat scherp omhoog

PLAATSEN DUWEN TREKKEN



HERHALEN TOTDAT DE BLOKKERING IS VERWIJDERD OF TOT 5 KEER

Als de blokkering niet wordt verwijderd, begint u met reanimatie

LifeVac Europe Ltd, Unit 2, Hill Village Business Park
Barnstaple, Devon EX32 0RP

www.lifevac.uk
Telefoon +44 (0) 7599 210 161

